

BioNette™


Importato e Distribuito da:
SILMARC PHARMA srl

Via Don Aldo Gigli, 1
55012 Guamo (LU)
Tel. 0583-948884
Fax: 0583-947742

www.silmarc.it silmarc@silmarc.it



Changzhou BioLight Medical Devices
Block C, Building 7, Israel Centre N. 123
Hexiang Road, Wujin District, 213149
Changzhou, Jiangsu Province, PRC

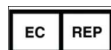

Shanghai International Holding Group,
GmbH (Europe), Eiffestr. 80, 20537
Amburgo, D

Manuale di Istruzioni e Avvertenze



Dispositivo Medico
Dispositivo per uso esterno.
Lotto: Vedere confezione.
Scadenza: Vedere confezione.

Vedere le Istruzioni
per l'uso

Un nuovo dispositivo rivoluzionario inteso per il trattamento della rinite allergica (febbre da fieno). **BioNette™** procura sollievo e previene efficacemente i sintomi associati alla rinite allergica quali: faringe pruriginosa, occhi pruriginosi, orecchie pruriginose, naso pruriginoso, naso che cola, lacrimazione, starnuti, mal di testa e occhi umidi. Il trattamento non è né chimico



né farmacologico e non ha effetti collaterali noti. Il trattamento si basa sul principio della fototerapia (trattamento con energia luminosa).

Il dispositivo **BioNette™** utilizza una tecnologia di luce a banda stretta a basso livello.

METODO D'UTILIZZO

Ciascuna sessione di trattamento dura circa 4,5 minuti. La frequenza d'uso raccomandata è di 2-3 volte al giorno. Per ottenere la massima efficacia e un sollievo ottimale, si raccomanda di iniziare l'uso di **BioNette™** immediatamente al sopraggiungere dei primi sintomi di rinite.

Una volta ottenuti miglioramenti, si può ridurre la frequenza d'uso come necessario, fino a terminarla completamente.

BioNette™ è un piccolo dispositivo che entra anche nella più piccola tasca.

PRIMA DEL PRIMO USO

Rimuovere la sottile pellicola trasparente di protezione delle pile.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Modo d'uso:


- Spingere e tenere premuti entrambi i pulsanti di gomma sul lato del dispositivo. Le due punte chiare emetteranno una luce rossa.
- Assicurarsi che la luce rossa sia continua e non pulsante.
- Inserire le punte nel naso mentre si premono i due pulsanti in gomma.
- Rilasciare i pulsanti in gomma.
- Il trattamento è completo quando la luce rossa si ferma automaticamente, dopo circa 4,5 minuti. (Una volta attivata, non può essere spenta durante un ciclo di trattamento).
- Seguire le istruzioni di pulizia descritte nel manuale.
- Si raccomanda una frequenza d'uso di 2-3 volte al giorno. L'efficacia può aumentare con un uso ripetuto.

Attenzione: - Per i bambini è necessaria la supervisione genitoriale. – Non guardare direttamente la sorgente luminosa. – Tenere al di fuori della vista e della portata dei bambini.

SOSTITUZIONE PILE

Il dispositivo **BioNette™** include 2 pile al litio CR2032 (3V) ad alta qualità.

Togliere il tappo delle pile e inserirle in posizione corretta, come nel dis.1.

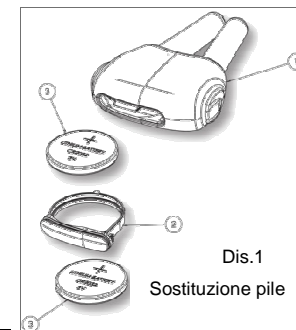

Dis.1

Sostituzione pile

SPECIFICHE TECNICHE

Trattamento di luce	Luce a 630 nm a banda stretta
Potenza illuminante	Minimo 10,0 mW (+/-20%) per ciascuna narice
Quantità di energia	2,7 joule
Timer	Si spegne automaticamente dopo circa 4,5 minuti
Accuratezza timer	Deviazione ± 15%
Sorgente potenza	2 x CR2032 (3V)
Corrente (max)	0,3 A
Durata pile	Fino a 80 trattamenti
Indicatore pile scariche	LED rosso che lampeggia
Peso dispositivo	18 gr con le pile
Dimensioni dispositivo	52 x 38 x 15 mm

INTERAZIONI

Non sono note interazioni nell'uso del dispositivo in aggiunta a farmaci. **BioNette™** può essere utilizzato quando si assumono farmaci quali antistaminici, che sono assunti oralmente, corticosteroidi, o farmaci per prevenire la congestione nasale.

EFFETTI COLLATERALI

Non sono noti effetti collaterali quando si usa il dispositivo. Persone che soffrono di casi gravi di rinite allergica possono utilizzare **BioNette™** più di tre volte al giorno senza temere alcun effetto collaterale.

PANORAMICA SULLA SERIE DI PRODOTTI BIOLIGHT

La linea di prodotti BIOLIGHT – di cui **BioNette™** è soltanto uno dei prodotti – è una serie di dispositivi medici che utilizzano la tecnologia fototerapica a basso livello e banda stretta, per trattamenti non invasivi e non farmacologici. Questi prodotti sono stati sviluppati da un gruppo di scienziati e medici specializzati in fotobiologia e fototerapia. I prodotti sono accompagnati da dati clinici e scientifici di supporto, ricevuti da un gran numero di ospedali e cliniche, alcuni dei quali sono stati pubblicati su riviste mediche specialistiche. Questi prodotti costituiscono un significativo passo avanti nei trattamenti non farmacologici. I loro effetti sono impressionanti e non hanno effetti collaterali noti.

L'introduzione del dispositivo **BioNette™** offre una nuova alternativa rivoluzionaria per il trattamento della rinite allergica, di tipo non farmacologico.

Altri prodotti BIOLIGHT includono:

BIOSTICK™, BIOBEAM™ 660, BIOBEAM™ 940 E BIOBEAM™ ACNE.

BioNette™ è marchio registrato.

PULIZIA

La sorgente luminosa dovrebbe essere pulita con una soluzione detergente delicata applicata con un panno morbido. **BioNette™** non dovrebbe mai essere immerso nell'acqua.

Sterilizzazione: si raccomanda di pulire le sorgenti luminose con un panno imbevuto di alcool al 70%.

Protezione igienica: mantenere le migliori condizioni igieniche possibili.

PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione / azione
La luce rossa non si accende	Le pile sono vecchie o scariche	Sostituire le pile
	Le pile sono state messe in posizione errata	Ricollocare le pile
	BioNette™ non funziona	Se le soluzioni sopra non risolvono il problema contattare il distributore
La luce rossa lampeggia	Le pile sono scariche	Sostituire le pile

GARANZIA DEL FABBRICANTE

La garanzia è rilasciata al consumatore che acquista il dispositivo e si assicura che il dispositivo sia privo di difetti, sia riguardo al materiale che alle corrette condizioni operative.








La garanzia è valida due anni dalla data di acquisto.

La garanzia è per la riparazione o la sostituzione senza spesa di parti, che a discrezione del fabbricante, si sono danneggiate durante le normali condizioni operative e quando il dispositivo è stato utilizzato secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.

LA GARANZIA NON SI APPLICHERA' NEI CASI SEGUENTI

- Uso improprio.
- Riparazione da parte di qualcuno diverso dal fabbricante o da un rappresentante ufficiale di fabbricante.
- Danno o rotture accidentali.
- Danni causati da pile non adatte.

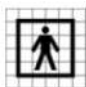SIMBOLI SULLA CONFEZIONE

	Osservare attentamente le Istruzioni		Mandatario
	Fabbricante		Leggere il Manuale di Istruzioni
	Tipo "BF" IEC 60601-1		Data di fabbricazione
	WEEE – Apparecchiatura elettrica ed elettronica		



CE 0473 